

Hear now. And always



Nieuw bij Cochlear

Nu beschikbaar! (juni 2014)

Cochlear™ Nucleus® Aqua Accessoire

Nieuwe sluiting, nu ook
herbruikbaar



Binnenkort beschikbaar!



Cochlear™ Nucleus® Aqua+


Volledig waterdicht,
herbruikbaar en comfortabel
in gebruik



Cochlear™ Nucleus® Aqua Accessoire

Nieuwe sluiting, nu ook
herbruikbaar

Wat is het verschil tussen de nieuwe en oude Nucleus Aqua Accessoire?

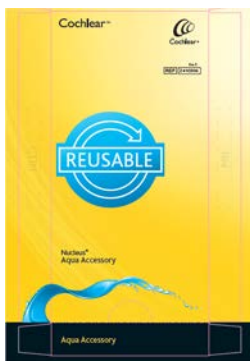

De Aqua Accessoire voor eenmalig gebruik wordt vanaf nu vervangen door de herbruikbare Aqua Accessoire. De nieuwe herbruikbare Aqua Accessoire kan tot 20 maal worden gebruikt.

Voortaan is deze herbruikbare Aqua Accessoire enkel te verkrijgen in een 5-pack. Andere volumes zijn niet meer beschikbaar.

De verpakking is duidelijk herkenbaar aan het “Reusable” of “Herbruikbaar” logo.

De herbruikbare Aqua Accessoire is zeer eenvoudig in gebruik. Je plaatst de geluidsprocessor met spoel en spoelkabel in de Aqua Accessoire en sluit deze dan hermetisch af.

Deze Aqua Accessoire is ideaal voor gebruik in bad en douche of tijdens een zwempartij.

Belangrijk om weten bij de herbruikbare Aqua Accessoire!

- Een IP68 waterbestendigheidsscore (getest op 4m diepte tot max. 2 uur)
- Enkel te gebruiken met herlaadbare batterijen, knoopcelbatterijen vereisen immers zuurstof
- Voor Nucleus Freedom, Nucleus 5 CP800 en Nucleus 6 CP900 geluidsprocessors

Hear now. And always



- De herbruikbare Aqua Accessoire is tot 20 maal herbruikbaar. Volg zorgvuldig de gebruiksaanwijzing
- Een Aqua Accessoire pack bevat 5 zakjes
- De Aqua Accessoire bevat geen latex
- Elke Nucleus geluidsprocessor configuratie bevat voortaan een herbruikbare Aqua Accessoire pack
- Plaats je geluidsprocessor 's avonds na gebruik met de Aqua Accessoire minimum 8 uur in je droogkit Dry & Store.



Hoe bestelt u de herbruikbare Aqua Accessoire pack?

Mogelijkheden	Prijs (excl.6%BTW)
Z446156 herbruikbare Aqua Accessoire (5-pack)	35 €

De herbruikbare Aqua Accessoire pack is onmiddellijk beschikbaar.

Hear now. And always



Cochlear™ Nucleus® Aqua+

Volledig waterdicht,
herbruikbaar en comfortabel
in gebruik

Wat is de nieuwe Nucleus Aqua+?

De nieuwe Nucleus Aqua+ is een volledige set waarmee je met je Nucleus geluidsprocessor veilig kan deelnemen aan alle activiteiten in water. Aqua+ is volledig waterdicht en het **hoesje is tot 50 maal herbruikbaar**. Aqua+ is meer dan enkel een hoes voor je geluidsprocessor:



De volledige set bevat twee hoesjes, een specifieke Aqua+ spoel en magneet. Deze spoel is herkenbaar aan de blauwe cirkel in de spoel. U mag enkel deze spoel gebruiken voor een volledig waterdichte garantie. U ontvangt eveneens een veiligheidskoordje met bevestiging en een Mic-lock voor de oorhaak. Bij gebruik van de Aqua+ volg je best de korte handleiding. Na gebruik kan de set terug in het compact opbergzakje.

Belangrijk om weten bij Aqua+!

- Een IP68 waterbestendigheidsscore (getest op 3m diepte tot max. 2 uur)
- Enkel te gebruiken met herlaadbare batterijen, knoopcelbatterijen hebben immers zuurstof nodig
- Voor Nucleus 6 CP900 en Nucleus 5 CP800 geluidsprocessors
- De Aqua+ hoesjes zijn tot 50 maal herbruikbaar
- De Aqua+ spoel hoeft u niet te vervangen en blijft herbruikbaar
- De Aqua+ kit bevat 2 hoesjes – de hoesjes bevatten geen latex
- Er zijn 2 spoelkabel lengtes en verschillende magneetsterktes beschikbaar
- Plaats je geluidsprocessor 's avonds na gebruik met Aqua+ minimum 8 uur in je droogkit Dry & Store



Hoe bestelt u de Aqua+ kit?

Mogelijkheden	Prijs (excl.6%BTW)
Aqua+ kit als onderdeel van de Nucleus 6 geluidsprocessor configuratie	Niet van toepassing
CN6-AAP Aqua+ kit (aparte bestelling)	190 €
Z463273 Aqua+ hoesjes (2-pack)	40 €

De Aqua+ kit is momenteel nog niet beschikbaar, maar verschijnt zeer binnenkort.